

# So einfach und sicher ist die Anwendung:

Eine Person ohne Lebenszeichen liegt am Boden.  
Wie können Sie mit einem Defibrillator helfen?

1

Defi holen und Oberkörper des Bewusstlosen frei machen



2

Klebelektroden einstecken und wie darauf abgebildet auf Brustkorb kleben



3

Defi mit grüner Taste einschalten, das Gerät gibt daraufhin klare gesprochene Anweisungen. Auf Knopfdruck (grüne Taste) überprüft es automatisch das Herz des Betroffenen. Nur bei tatsächlichem Bedarf empfiehlt das Gerät akustisch und am Display, einen Schock auszulösen. Sie müssen dann nur mehr auf die rote Taste drücken und darauf achten, den Bewusstlosen dabei nicht zu berühren. FRED easy und easyport leiten Sie daraufhin weiter mit gezielten Anweisungen, bis professionelle Hilfe eintrifft.

